

Caratteristiche tecniche

Gamma di misura: 32~42 °C / 89,6~107,6 °F
 Precisione: ± 0,1 °C / 0,2 °F (35,5~42,0 °C / 95,9~107,6 °F)
 ± 0,2 °C / 0,4 °F (32~35,5 °C / 89,6~95,9 °F)
 Durata batteria: 100 ore circa di utilizzo continuativo

Utilizzo

- Prima dell'uso disinfettate la sonda o posizionate un coprisonda sulla punta.
- Premete il pulsante di accensione, avvertirete un bip.
- Dopo il test di controllo iniziale il display visualizza l'ultima misurazione effettuata per 2 secondi.
- Quando appare sul display "Lo" e inizia a lampeggiare la lettera °C o °F è possibile iniziare la misurazione.
- Durante la misurazione restate nello stesso luogo/posizione fino al termine.
- Sul display viene visualizzata in continuo la temperatura misurata.
- La misurazione è completata quando si raggiunge un valore costante e il termometro emette quattro bip.
- E' possibile che continuando la misurazione dopo il bip, il valore misurato salga ancora leggermente.
- Il termometro si spegne automaticamente dopo circa 10 minuti, in ogni caso per prolungare la durata della batteria è consigliabile spegnerlo dopo l'uso premendo il pulsante.
- Per cambiare la scala di misura (tra °C e °F) accendere il termometro e tenere premuto il tasto di accensione per 2 secondi.

TERMOMETRO DIGITALE

Leggete con cura le istruzioni seguenti prima dell'uso.


Il termometro digitale è un dispositivo per la misurazione della temperatura corporea, indicato sia per uso ospedaliero che familiare. Rispetto ai modelli tradizionali in vetro e mercurio, ha i vantaggi di una semplice lettura, veloce e accurata misurazione, memorizzazione, allarmi, ecc.

In particolare risulta maggiormente sicuro per la persona e l'ambiente poichè senza mercurio.

Il termometro è stato calibrato dal fabbricante e non sono necessarie successive calibrazioni. Per qualsiasi dubbio sulla precisione dello strumento contattate il Vostro rivenditore.

Metodi di misurazione

- Per le misurazioni nel retto, inserite delicatamente il sensore nel retto. Non muovetevi fino al termine della misurazione. Il tempo di misurazione va da circa 40 a 60 secondi.
- Per le misurazioni sotto l'ascella, prima di iniziare tenete il braccio appoggiato al torace in modo che l'ascella resti chiusa, per 5 minuti circa. Posizionate il sensore al centro dell'ascella in una posizione stabile, non muovete il braccio fino al termine della misurazione. La misurazione ascellare può essere inferiore di 0,5 °C - 1,5° C rispetto a quella rettale e il tempo di misurazione va da circa 80 a 120 secondi.
- Per le misurazioni sotto la lingua, prima di iniziare non aprire la bocca per 5 minuti circa. Posizionate il sensore sotto la lingua in una posizione stabile, non aprire la bocca fino al termine della misurazione. Non mangiare o bere prima della misurazione. In genere la temperatura orale è di 0,3 °C a 0,8 °C inferiore rispetto alla temperatura rettale. Il tempo di misurazione va da circa 50 a 70 secondi.

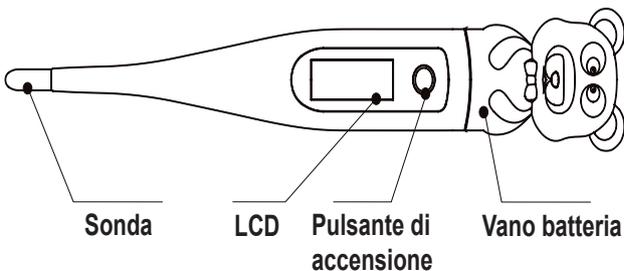

Disinfettate la sonda solo con alcol o disinfettanti equivalenti, NON bollire il termometro! NON sterilizzare in autoclave!

Non immergete il prodotto in acqua o liquidi! Evitate l'esposizione diretta ai raggi solari e agli agenti atmosferici. Non misurate temperature diverse da quella corporea!

Sostituzione batteria

- La batteria deve essere sostituita quando sul display lampeggia il simbolo



- Sfilate delicatamente il cappuccio posteriore e rimuovete la vecchia batteria con l'aiuto di uno stuzzicadenti o un punteruolo.
- Inserite una nuova batteria da 1,5 V (LR/SR-41).
- Riposizionate il cappuccio posteriore



Non smontate il prodotto se non per le operazioni necessarie al cambio batteria! Non lasciare le batterie o il cappuccio posteriore alla portata dei bambini!



Lo smaltimento del prodotto o della batteria deve essere effettuato rispettando le norme vigenti nel Vostro paese.

REF 25555 / DT-11G

Fabbricante
Manufacturer

Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments. Co., Ltd.
 Building 2, Baimiao Ind. Park, Economic Develop. Zone Wuchang
 310023 Hangzhou, Zhejiang - China
 Made in P.R.C.

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH
 Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg - Germany