



MODELLO TCU 380 PLUS

MODELLO : MINI, NORMALE, MAXI

DISPOSITIVO CONTRACCETTIVO INTRAUTERINO

LA SPIRALE NON PROTEGGE DA MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE/AIDS

ISTRUZIONI PER L'USO (IFU)

LA SPIRALE TCU 380 PLUS DEVE ESSERE INSERITA E RIMOSSA SOLAMENTE DA UN MEDICO/GINECOLOGO

INFORMAZIONI GENERALI

I DISPOSITIVI CONTRACCETTIVI SMB/MBT TCU 380 PLUS SONO FATTI CON MATERIALE DI COMPOSTI DI POLIETILENE E SOLFATO DI BARIO E SPIRALIZZATI CON UN SOTTILE FILO DI RAME 0.40 mm DI DIAMETRO DANDO UNA SUPERFICE DI 380 mm² ± 23 mm². LA SPIRALE HA UN FILO DI POLIAMIDE (SUTURE) PER FACILITARE LA RIMOZIONE, E' INSERITA IN UN TUBO CON UNA BARRETTA IL TUTTO IN UNA CONFEZIONE STERILE DI PLASTICA. IL TUBO COMPRENDE UNA FRANGIA GRADUATA PER MISURARE E VALUTARE LA PROFONDITA' DEL CANALE CERVICALE E LA CAVITA' UTERINA.

INDICAZIONI : CONTRACCETTIVO IN DONNA FERILE

DURATA : LA SPIRALE CU 380 PLUS PUO' ESSERE PORTATA PER UN MASSIMO DI 60 MESI (5 ANNI). SE SI DESIDERA PROLUNGARE IL PERIODO DI CONTRACCEZIONE LA SPIRALE VA SOSTITUITA CON UNA NUOVA.

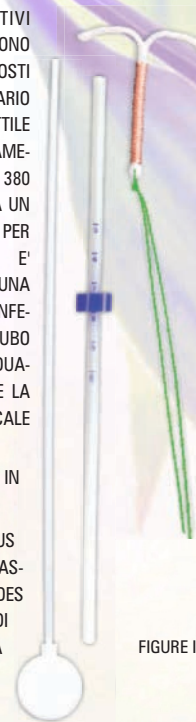


FIGURE I

CRITERI DI SELEZIONE DEL DISPOSITIVO TRA MINI, MAXI, NORMALE

DIMENSIONE /MODELLO	LUNGHEZZA VERTICALE	PROFONDITA' UTERO	INTERVALLO DI MISURA
Mini	30.5 ± 0.5 mm	36 mm	6-7.5 cm
Normal	33 ± 0.5 mm	45 mm	7-8.5 cm
Maxi	38 ± 0.5 mm	53 mm	8- 9 cm

QUESTE INFORMAZIONI SONO INDICATIVE . LA DECISIONE FINALE PER LA SCELTA DELLA SPIRALE SPETTA AL GINECOLOGO/MEDICO

LA SPIRALE 380 PLUS E' CONSIGLIATA PER DONNE :

- IN ETA' FERILE
- ABBIANO UNA RELAZIONE MONOGAMA
- NESSUNA STORIA DI INFIAMMAZIONE PELVICA
- SCELTA DI NON USARE CONTRACCETTIVI

LA SPIRALE 380 PLUS NON DEVE ESSERE INSERITA IN DONNA :

- IN GRAVIDANZA
- ABBA ANCORA UNA SPIRALE INSERITA
- ABBA UNA SOSPETTA O CONOSCIUTA PATOLOGIA DEL TRATTO GENITALE INCLUSO UN SANGUINAMENTO VAGINALE SCONOSCIUTO OD UN PAP TEST NON NORMALE, OPPURE UNA GRAVE ANORMALITA' UTERINA
- CON ENDOMETRITE POST-PARTUM O INFEZIONE DOPO ABORTO AVVENUTO NEI PRECEDENTI 3 MESI
- ABBA ACTINOMICOSI GENITALE

LA SPIRALE NON DOVREBBE ESSERE LA PRIMA SCELTA PER UNA DONNA CHE :

- HA CICLI DOLOROSI E PROLUNGATI
- ANEMIA
- STENOSI CERVICALE O RISTRINGIMENTO DEL CANALE CERVICALE
- IMPOSSIBILITA' DI ESSERE SEGUITA DOPO INSERIMENTO UNA STORIA DI GRAVIDANZE EXTRAUTERINE

MOMENTO DELL'INSERIMENTO

LA SPIRALE VA INSERITA DURANTE IL CICLO MESTRUALE SEMPRE CHE LA DONNA NON SIA GRAVIDA ED ABBA USATO DEI CONTRACCETTIVI FINO ALL'ULTIMO CICLO. DATO IL PICCOLO DIAMETRO DEL TUBICINO QUESTO PUO' ESSERE INTRODOTTI FACILMENTE E NON NECESSITA DI ULTERIORE DILATAZIONE.

ALCUNI MEDICI PREFERISCONO INSERIRE LE SPIRALI ENTRO 7 GIORNI DALLA FINE DEL CICLO PERCHE' L'APERTURA DELLA CERVICE E' SUFFICIENTEMENTE APERTA DURANTE QUESTO PERIODO, FACILITANDO L'INSERIMENTO ED EVITANDO GRAVIDANZE L'INSERIMENTO IN QUESTO PERIODO PROVOCA MENO DISAGIO NONCHE' ASSENZA DI CRAMPI E PERDITE PER LA PAZIENTE.

PROCEDURE PER L'INSERIMENTO

E' ASSOLUTAMENTE NECESSARIO CHE LA SPIRALE NON VENGA TOCCATA DURANTE L'INSERIMENTO PER GARANTIRE LA STERILITA'. NON DEVE ESSERE UTILIZZATA SE LA CONFEZIONE RISULTA DANNEGGIATA.

A. PREPARAZIONE

1. EFFETTUARE UNA VISITA A DUE MANI PER DETERMINARE LA CONFORMAZIONE, FLESSIONE E L'ASSE UTERINA
2. CON UNO SPECULUM ALLARGARE LA CERVICE. DISINFETTARE LE PARETI DELLA VAGINA E CERVICE CON UN BATUFOLO DI COTONE STERILE IMBEVUTO DI LIQUIDO ANTISETTICO ASPORTARE EVENTUALI SECREZIONI DELLA PARTE ESTERNA
3. PRENDERE CON UN TENACOLO IL LABBRO ANTERIORE DELLA CERVICE, TIRANDOLO IN MODO DA RADDRIZZARE L'ASSE UTERINA ED EVITARE DELLE LACERAZIONI CONTRAZIONI INVOLONTARIE NELL'APPLICARE IL TENACOLO POSSONO ESSERE EVITATE CON UNA INIEZIONE DI UN ANESTETICO NELLA LABBRA ANTERIORE O NEL BLOCCO PARACERVICALE

4. MISURARE CON CAUTELA L'UTERO CON APPARECCHIO AD ULTRASUONI PER DETERMINARE LA PROFONDITA' E PER CONFERMARE LA DIREZIONE DELL'ASSE. SE SI AVVERTE UNA RESISTENZA NON NORMALE ALL'INTERNO, E' CONSIGLIABILE DILATARE GENTILMENTE IL CANALE CERVICALE DI 4-5 mm, UTILIZZANDO UN DILATATORE CONICO ANZICHE' ROTONDO. NEL CASO DI NON DISPONIBILITA' DI STRUMENTI ADATTI, IL SISTEMA AD ULTRASUONI PUO' DARE UN' IDEA DELLA CONFIGURAZIONE.

B. PROCEDURA PER L'INSERIMENTO

COME REGOLA GENERALE LA SPIRALE VA INSERITA IN CONDIZIONI ASETTICHE E CON GUANTI STERILI. I SEGUENTI PASSI DEVONO ESSERE ESEGUITI PER L'INSERIMENTO :

1. APRIRE IL SACCHETTO DALLA PARTE DOVE E' RIPORTATO "OPEN" (APRIRE), A CIRCA META' DELLA FRANGIA. SENZA TOGLIERE LA SPIRALE DALLA CONFEZIONE TIRARE IL FILO IN MODO DA FAR RIENTRARE LE ALETTE NEL TUBO FINO ALL'ORLIVA (VEDI FIG. II E III)
2. MANTENENDO IL FILO DRITTO CON UNA MANO INSERIRE LA BARRETTA NEL TUBO CON LA MANO LIBERA. QUESTO GARANTIRA' CHE IL FILO SIA DRITTO NEL TUBO E NON ATTORCIGLIATO (FIG III)
3. CONTROLLARE LA POSIZIONE DELLE FRANGE UTILIZZANDO IL CENTIMETRO PER VALUTARE LA PROFONDITA' DELL'UTERO. LA SPIRALE E' ORA PRONTA PER ESSERE INSERITA.

C. INSERIMENTO DELLA SPIRALE TCU 380 PLUS

1. PULIRE LA CERVICE CON ANTISETTICO
2. TOGLIERE IL TUBO CON SPIRALE DALLA COFEZIONE ED INSERIRE IL TUTTO ATTRAVERSO IL CANALE CERVICALE FINO AL CONTATTO CON LA CERVICE. QUESTO CONFERMA CHE LE ALETTE RIPIEGATE SIANO A CONTATTO CON IL "FUNDUS" (FIG. IV)
3. TENENDO FERMA LA BARRETTA RITIRARE IL TUBICINO FINO ALL'IMPUGNATURA DELLA BARRETTA IN MODO DA LIBERARE LE ALETTE DELLA SPIRALE. (FIG. V)
4. SPINGERE GENTILMENTE IL TUBO FINO A CHE LE ALETTE TOCCHINO LA CERVICE. A QUESTO PUNTO LA SPIRALE E' A CONTATTO CON IL "FUNDUS". (FIG. VI).
5. RITIRARE LA BARRETTA TENENDO FERMO IL TUBO. RITIRARE IL TUBO. TAGLIARE IL FILO LASCIANDO CIRCA 2-3 cm DALLA CERVICE (FIG VII).

CONTROINDICAZIONI :

A ASSOLUTE

- GRAVIDANZA
- INFIAMMAZIONE PELVICA GRAVE O STORIA DI MALATTIA DI INFIAMMAZIONE PELVICA.
- ENDOMETRITE POSTPARTUM O ABORTO
- UN'INFEZIONE TRASMESSA SESSUALMENTE INCLUDENDO INFEZIONI VAGINALI COME GONORREA O CLAMIDIA
- AD ALTO RISCHIO DI INFEZIONI DOVUTO A RAPPORTI DI ENTRAMBI I PARTNER CON VARIE PERSONE



MODELLO TCU 380 PLUS

MODELLO : MINI, NORMALE, MAXI

DISPOSITIVO CONTRACCETTIVO INTRAUTERINO

LA SPIRALE NON PROTEGGE DA MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE/AIDS

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZATORE (ITU)

QUESTE INFORMAZIONI SONO A CARATTERE GENERALE E NON INTENDONO SOSTITUIRE IL CONSIGLIO DEL MEDICO

LA SPIRALE TCU 380 PLUS E' CONSIGLIATA PER LE DONNE CHE :

- SONO IN PERIODO FERILE
- HANNO UNA RELAZIONE MONOGOMA
- NESSUNA STORIA DI INFIAMMAZIONE PELVICA
- FANNO UNA SCELTA DI NON USARE CONTRACCETTIVI

LA SPIRALE CU380 PLUS E' SCONSIGLIATA PER LA DONNA :

- IN GRAVIDANZA
- ABBA ANCORA UNA SPIRALE INSERITA
- ABBA UNA SOSPETTA O CONOSCIUTA PATOLOGIA DEL TRATTO GENITALE INCLUSO UN SANGUINAMENTO VAGINALE SCONOSCIUTO OD UN PAP TEST NON NORMALE, OPPURE UNA GRAVE ANORMALITA' UTERINA
- CON ENDOMETRITE POST-PARTUM O INFEZIONE DOPO ABORTO AVVENUTO NEI PRECEDENTI 3 MESI
- ABBA ACTINOMICOSI GENITALE
- MALATTIA DI WILSON E/O ALLERGIA AL RAME

LA SPIRALE NON DOVREBBE ESSERE LA PRIMA SCELTA PER UNA DONNA CHE :

- HA CICLI DOLOROSI E PROLUNGATI
- STENOSI CERVICALE O RISTRINGIMENTO DEL CANALE CERVICALE
- IMPOSSIBILITA' DI ESSERE SEGUITA DOPO INSERIMENTO
- UNA STORIA DI GRAVIDANZE EXTRAUTERINE

CONTROINDICAZIONI

A ASSOLUTE

- GRAVIDANZA
- INFIAMMAZIONE PELVICA GRAVE O STORIA DI MALATTIA DI INFIAMMAZIONE PELVICA.
- ENDOMETRITE POSTPARTUM O ABORTO
- UN'INFEZIONE TRASMESSA SESSUALMENTE INCLUDENDO INFEZIONI VAGINALI COME GONORREA O CLAMIDIA
- AD ALTO RISCHIO DI INFEZIONI DOVUTO A RAPPORTI DI ENTRAMBI I PARTNER CON VARIE PERSONE
- ABBA UNA SOSPETTA O CONOSCIUTA PATOLOGIA DEL TRATTO GENITALE INCLUSO UN SANGUINAMENTO VAGINALE SCONOSCIUTO OD UN PAP TEST NON NORMALE
- OPPURE UNA GRAVE ANORMALITA' UTERINA
- ALLERGIA AL RAME
- UNA GRAVE CERVICE O VAGINITE NON CURATA E DOVUTA A BATTERI FINO A CHE NON VENGA CURATA
- PREDISPOSIZIONE AD INFEZIONI DA MICROORGANISMI, QUESTO INCLUDE MA NON E' LIMITATO A LEUCEMIA, AIDS, ED ABUSO DI DROGHE PER VIA ENDOVENOSA
- MALATTIA DI WILSON - PICCOLA CAVITA' UTERINA

B SUGGERITE

- DISMENORREA ACUTA - MALATTIE CARDIOVASCOLARI
- PROBLEMI DI COAGULAZIONE

EFFETTI SECONDARI

- PERDITE TRA I CICLI - POSSIBILI MENSTRU' PIU' INTENSI E PROLUNGATI
- POSSIBILI DOLORI ADDOMINALI - INFIAMMAZIONI PELVICHE
- ESPULSIONE PARZIALE O TOTALE - TRAFITTE UTERINE

REAZIONI NEGATIVE

LE SEGUENTI REAZIONI NEGATIVE ED EFFETTI COLLATERALI SONO STATI SEGNALATI NELL'USO DELLE SPIRALI E POSSONO VERIFICARSI DOPO L'INTRODUZIONE DELLE STESS. CONTATTARE IL MEDICO NEI SEGUENTI CASI :

- GRAVIDANZA CON LA PRESENZA DELLA SPIRALE NELL'UTERO SIA CHE SIA PARZIALMENTE COMPLETAMENTE ESPULSA
- PERDITE E/O SANGUINAMENTI TRA I CICLI
- MANCANZA O RITARDO DEL CICLO - DOLORI
- CICLI PROLUNGATI O ABBONDANTI - ANEMIA
- DOLORI O CRAMPI NELL'INSERIMENTO DELLA SPIRALE
- SCARICHE VAGINALI ED INFEZIONI - EMICRANIE
- DOLORI ALLE GAMBE OD INDOLENZIMENTO
- ALLERGIA CAUSATA DALLA SPIRALE

DURATA CONTRACCETTIVA DELLA SPIRALE

LA BIBLIOGRAFIA INTERNAZIONALE SUGGERISCE DI NON OLTREPASSARE I CINQUE ANNI DALL'INSERIMENTO



MODELLO TCU 380 PLUS

MODELLO : MINI, NORMALE, MAXI

DISPOSITIVO CONTRACCETTIVO INTRAUTERINO

CITTA'.....

CLINICA :

MEDICO.....

NOME DELL'UTILIZZATRICE :

PROSSIMO APPUNTAMENTO PER CHECK UP.....

DATA DELL'INSERIMENTO :

DATA DI RIMOZIONE :

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZATRICE :

DOPO L'INSERIMENTO DEL DISPOSITIVO SI POSSONO AVVERTIRE PER POCO TEMPO DEI PICCOLI CRAMPI

ESSI POSSONO ESSERE CONTROLLATI CON DEGLI ANALGESICI O CON L'APPLICAZIONE DI UN PANNINO CALDO SULL'ADDOME.

DOPO 4-6 SETTIMANE DALL'INTERVENTO EFFETTUARE UN CONTROLLO DAL PROPRIO MEDICO

DURANTE IL PRIMO MESE DALL'INSERIMENTO CONTROLLARE REGOLARMENTE IL FILO SPECIALMENTE DOPO IL CICLO E DOPO LE MESTRUAZIONI. SE IL FILO NON SI TROVA OD E' PIU' CORTO O PIU' LUNGO DEL NORMALE INTERPELLARE IL MEDICO.

SE IL FILO NON SI TROVA O LA PARTE DI PLASTICA DEL DISPOSITIVO PUO' ESSERE TOCCATA CON LA MANO O SE IL DISPOSITIVO VIENE ESPULSO O SE SI SALTA UN CICLO INTERPELLARE IMMEDIATAMENTE IL PROPRIO MEDICO.

DOPO 3 MESI DALL'INSERIMENTO SI POSSONO VERIFICARE DELLE MINIME MACCHIE INTERMESTRUALI, SANGUINAMENTI, FLUSSI MESTRUALI PROLUNGATI O ACCRESCIUTI, SE CONTINUANO INTERPELLARE IL MEDICO

SE IL CICLO RITARDA PIU' DI 10 GIORNI E SI AVVERTONO SINTOMI DI GRAVIDANZA COME NAUSEA, SENI DOLENTI ETC. CONSULTARE IL MEDICO

SE SI AVVERTE UN DOLORE ADDOMINALE O DOLORE DURANTE IL RAPPORTO OD INFEZIONI COME GONORREA, FEBBRE, BRIVIDI OD INDISPOSIZIONI INTERPELLARE IL PROPRIO MEDICO

CONSULTARE IL MEDICO PER UN CONTROLLO O PER LA SOSTITUZIONE DEL DISPOSITIVO

GRAVIDANZE CON LA SPIRALE CU380 PLUS POSSONO VERIFICARSI IN UNA PERCENTUALE INFERIORE AD UNA OGNI 100 DONNE IN UN ANNO. IN TAL CASO LA SPIRALE VA TOLTA IMMEDIATAMENTE.

ALLATTAMENTO PUO' CONTINUARE ANCHE CON L'USO DELLA SPIRALE IL DISPOSITIVO PROTEGGE DA UNA GRAVIDANZA PER 5 ANNI

SMB CORPORATION OF INDIA

(An ISO 9001 : 2008 / ISO 13485 : 2003 Certified Company)
13, 33-36, Prem Industrial Estate, Jogeshwari (E), Mumbai 400 060, India
E-mail : sales@smbcorp.com • Website : www.smbcorp.com

Mfg. Lic. No. 99

Obelis S.A, Boulevard Général Wahis 53, 1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2.732.59.54 • Fax: +(32) 2.732.60.03 • E-Mail : mail@obelis.net

- ABBA UNA SOSPETTA O CONOSCIUTA PATOLOGIA DEL TRATTO GENITALE INCLUSO UN SANGUINAMENTO VAGINALE SCONOSCIUTO OD UN PAP TEST NON NORMALE,
- OPPURE UNA GRAVE ANORMALITA' UTERINA
- ALLERGIA AL RAME
- UNA GRAVE CERVICITE O VAGINITE NON CURATA E DOVUTA A BATTERI FINO A CHE NON VENGA CURATA
- PREDISPOSIZIONE AD INFEZIONI DA MICROORGANISMI, QUESTO INCLUDE MA NON E' LIMITATO A LEUCEMIA, AIDS, ED ABUSO DI DROGHE PER VIA ENDOVENOSA
- MALATTIA DI WILSON
- PICCOLA CAVITA' UTERINA

B SUGGERITE

- DISMENORREA ACUTA
- MALATTIE CARDIOVASCOLARI
- PROBLEMI DI COAGULAZIONE

C EFFETTI SECONDARI

- PERDITE TRA I CICLI
- POSSIBILI MENSTRU I PIU' INTENSI E PROLUNGATI
- POSSIBILI DOLORI ADDOMINALI
- INFIAMMAZIONI PELVICHE
- ESPULSIONE PARZIALE O TOTALE
- TRAFITTE UTERINE

REAZIONI NEGATIVE

LE SEGUENTI REAZIONI NEGATIVE ED EFFETTI COLLATERALI SONO STATI SEGNALATI NELL'USO DELLE SPIRALI E POSSONO VERIFICARSI DOPO L'INTRODUZIONE DELLE STESS. CONTATTARE IL MEDICO NEI SEGUENTI CASI :

- GRAVIDANZA CON LA PRESENZA DELLA SPIRALE NELL'UTERO SIA CHE SIA PARZIALMENTE O COMPLETAMENTE ESPULSA
- PERDITE E/O SANGUINAMENTI TRA I CICLI
- MANCANZA O RITARDO DEL CICLO
- DOLORI
- CICLI PROLUNGATI O ABBONDANTI
- ANEMIA
- DOLORI O CRAMPI NELL'INSERIMENTO DELLA SPIRALE
- SCARICHE VAGINALI ED INFEZIONI
- EMICRANIE
- DOLORI ALLE GAMBE OD INDOLENZIMENTO
- ALLERGIA CAUSATA DALLA SPIRALE

ATTENZIONE

GRAVIDANZA EXTRAUTERINA

SE SI HA UNA GRAVIDANZA, PUR CON LA SPIRALE IN USO, QUESTA PUO' ESSERE UNA GRAVIDANZA EXTRAUTERINA (UN OVULO FERTILIZZATO NON NELL'UTERO MA PROBABILMENTE NELLE TUBE DI FALLOPPIO).

STERILE R



INFEZIONE PELVICA

ANCHE SE UN'INFIAMMAZIONE PELVICA CON L'USO DELLA SPIRALE E' MOLTO RARA, ESSA PUO' ESSERE LA CAUSA PIU' FREQUENTE DI TALE PATOLOGIA AL CONFRONTO CON ALTRI CONTRACCETTIVI. L'INCIDENZA MAGGIORE DI INFIAMMAZIONE PELVICA AVVIENE ENTRO 20 GIORNI DALL'INSERIMENTO. E' QUINDI NECESSARIO CURARE PRONTAMENTE LA DONNA CHE PRESENTI QUESTI SINTOMI

ESPULSIONE

QUALCHE VOLTA LA SPIRALE PUO' ESSERE ESPULSA DALL'UTERO NELLA VAGINA SPECIALMENTE DURANTE DEI CICLI CON FLUSSO ABBONDANTE DATO CHE DURANTE QUESTO, L'UTERO SI ALLARGA. NON ACCORGENDOSENE SI PUO' INCORRERE IN UNA GRAVIDANZA.

PERFORAZIONE

DURANTE L'INSERIMENTO E' RARO CHE AVVENGA UNA PARZIALE O TOTALE PERFORAZIONE DELLA PARETE DELL'UTERO O DELLA CEVICE MA PUO' ESSERE DIAGNOSTICATA IN SEGUITO.

E' STATA INDICATA ANCHE UNA MIGRAZIONE SPONTANEA. COMUNQUE SE UNA PERFORAZIONE E' STATA PROVOCATA ESTRARRE LA SPIRALE IMMEDIATAMENTE

NON RIUTILIZZARE LA SPIRALE PERCHE' QUESTO PUO' CAUSARE INFEZIONI AL BASSO VENTRE CON RISCHI DI INFERTILITA'.

ASPORTAZIONE

LA RIMOZIONE DELLA SPIRALE CU380 PLUS PUO' ESSERE RIMOSSA CON IL FORCIPE TIRANDO GENTILMENTE IL FILO. LE ALETTE DELLA SPIRALE SI CHIUDERANNO ALL'INSU MENTRE LA SI ASPORTA DALL'UTERO

QUALCHE VOLTA LA PENETRAZIONE PARZIALE O BLOCCO NEL MIOMETRIO PUO' CAUSARE DIFFICOLTA' ALLA RIMOZIONE. L'ASPORTAZIONE QUINDI NECESSITA UN INTERVENTO CHIRURGICO

OSSIDAZIONE DEL RAME

IL RAME UTILIZZATO PER LA SPIRALE PUO' APPARIRE SCOLORITO NELLA CONFEZIONE STERILE, MA QUESTO NON E' DA PREOCCUPARE. IL RAME SI OSSIDA A CAUSA DI ARIA CHE PENETRA ATTRAVERSO LA CONFEZIONE CAUSANDO SULLA SUPERFICE UN FILM DI OSSIDO O SOLFURO. LA CONFEZIONE DELLA SPIRALE DEVE ESSERE PERMEABILE PER LA STERILIZZAZIONE. SE LA CONFEZIONE NON E' DANNEGGIATA E LA DATA DI SCADENZA E' ANCORA VALIDA, LA SPIRALE E' STERILE ANCHE SE IL RAME E' OSSIDATO. STUDI CLINICI HANNO DIMOSTRATO CHE L'OSSIDAZIONE NON INCIDE SULLA SICUREZZA ED EFFICIENZA DELLA SPIRALE.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

CONSERVARE IL PRODOTTO IN MANIERA ADEGUATA LONTANO DA LUCE SOLARE, CALORE, ACQUA, E DANNI MECCANICI

SCADENZA

5 ANNI

SMB CORPORATION OF INDIA

(An ISO 9001 : 2008 / ISO 13485 : 2003 Certified Company)
13, 33-36, Prem Industrial Estate, Jogeshwari (E),
Mumbai 400 060, India
E-mail : sales@smbcorp.com
Website : www.smbcorp.com
Mfg. Lic. No. 99

Obelis S.A, Boulevard Général Wahis 53, 1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2.732.59.54 • Fax: +(32) 2.732.60.03 • E-Mail : mail@obelis.net

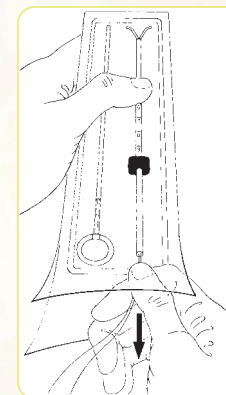


FIGURE II

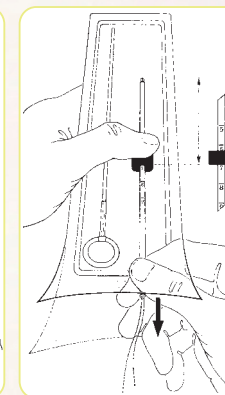


FIGURE III

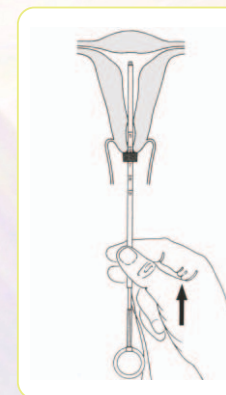


FIGURE IV

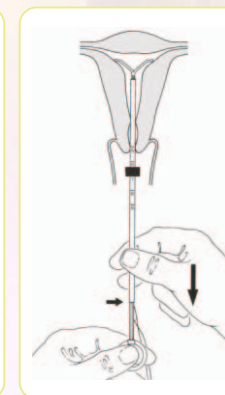


FIGURE V

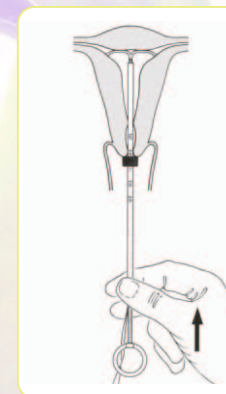


FIGURE VI

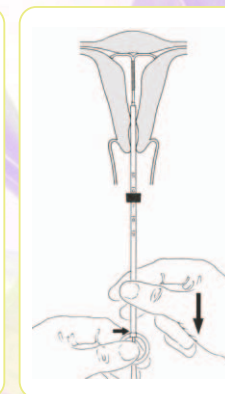


FIGURE VII

Rev.00 Dated 06.05.2016