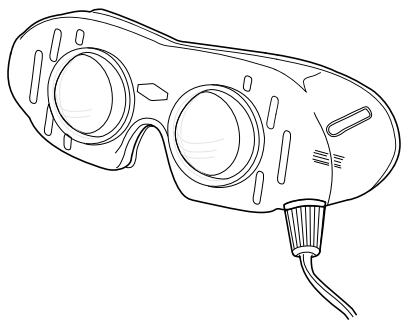
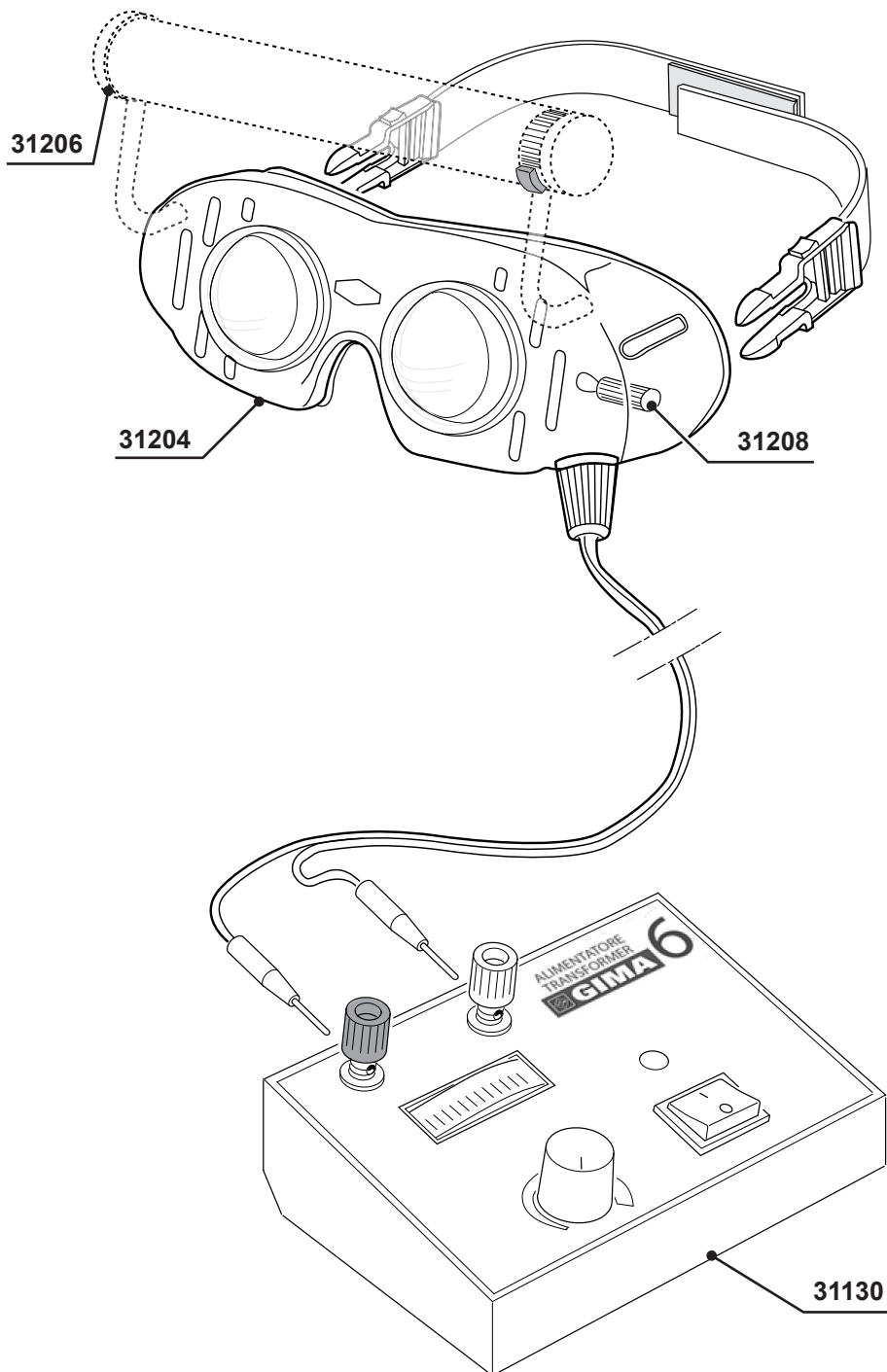

OCCHIALI NISTAGMO

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE



ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.





CARATTERISTICHE

Gli occhiali nistagmo sono un dispositivo per la rilevazione della reazione patologica del nistagmo. Lenti fisse, biconvesse, +/- 18,0 diottrie.

PRESCRIZIONI



Le lenti sono molto delicate, maneggiare gli occhiali con cura. Evitate di appoggiare gli occhiali su superfici che possono graffiare le lenti.

Il prodotto è destinato al solo utilizzo da parte di personale medico qualificato.



Non usate l'apparecchio se rilevate danni. Rivolgetevi al vostro rivenditore. Evitare qualunque riparazione precaria. Le riparazioni vanno effettuate esclusivamente con ricambi originali che vanno installati secondo l'uso previsto.

Il prodotto è realizzato con materiali resistenti alla corrosione e alle condizioni ambientali previste per il normale utilizzo, quindi non necessita di attenzioni specifiche; tuttavia occorre conservarlo in un ambiente chiuso, evitandone l'esposizione alla luce e agli agenti atmosferici, avendo cura di proteggerlo dalla polvere per poterne garantire le condizioni di igiene. Si raccomanda inoltre di conservare il prodotto in un luogo tale da essere facilmente raggiungibile dagli operatori in caso di necessità.

DISIMBALLO



Rammentiamo che gli elementi dell'imballo (carta, cellophan, punti metallici, nastro adesivo, ecc..) possono tagliare e/o ferire se non maneggiati con cura. Essi vanno rimossi con opportuni mezzi e non lasciati in balia di persone non responsabili; lo stesso dicasi per gli attrezzi utilizzati per la rimozione degli imballi (forbici, coltelli, ecc...).

La prima operazione da fare una volta aperti gli imballi, è un controllo generale dei pezzi e delle parti che compongono il prodotto; verificare che siano presenti tutti i componenti necessari e le loro perfette condizioni.

INSTALLAZIONE

- Agganciare le cinghie agli occhiali utilizzando gli appositi ganci.
- Posizionare gli occhiali sul viso del paziente e fissarli al capo regolando la tensione delle cinghie con le fasce in velcro.



I bulbi delle lampadine sporgono dall'interno degli occhiali, per evitare che possano provocare dolore evitare il contatto con le palpebre.

FUNZIONAMENTO

cod. 31204: Collegare gli spinotti agli appositi morsetti di un alimentatore idoneo, **regolare la tensione a 4 Volt.**

Si consiglia di utilizzare l'alimentatore GIMA 6 (cod. 31130), è tuttavia possibile utilizzare alimentatori di altre marche purchè con la stessa potenza, caratteristiche e conformi alle normative vigenti.



Non collegare gli spinotti alla rete ma utilizzare un'alimentatore idoneo alla tensione di 4 Volt.

cod. 31206: Questo modello permette di lavorare senza cavi e liberi dal condizionamento dell'alimentazione. L'alimentazione è garantita da 3 batterie da 1,5 Volt tipo C LR 14/AM2. Per installare o sostituire le batterie svitare il coperchio a vite laterale.

Per accendere l'illuminazione premere il pulsante blu, ruotando la rotella è possibile regolarne l'intensità.

MANUTENZIONE

Il prodotto è stato progettato per durare tutta la vita, è resistente alla maggior parte dei prodotti chimici ad eccezione dei chetoni M.E.K., dei diluenti e delle sostanze per rimuovere lo smalto. Maneggiare con cura il prodotto, evitare di dare colpi alle lenti che potrebbero rompersi e causare danni. Non toccare le lenti con le dita o con oggetti che potrebbero danneggiarle o sporcarle



Non usare materiali abrasivi per pulire le lenti, si potrebbero causare danni permanenti alle stesse.

Non immergete in acqua! Durante la pulizia, accertatevi di non bagnare con acqua o altri liquidi le lampadine, il cavo o gli spinotti.

Gli occhiali possono essere puliti a freddo con del disinfettante aiutandosi con una spugna.

Per la pulizia delle lenti utilizzare un detergente appropriato e un panno di cotone.

Se una delle lampadine dovesse guastarsi svitarla delicatamente e sostituirla con la lampadina di ricambio originale (cod. 31208).



Prima di rimuovere la lampadina è necessario accertarsi che lo strumento sia spento da alcuni minuti altrimenti si rischia di scottarsi.



Smaltimento: *Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per ulteriori informazioni sui luoghi di raccolta, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto. In caso di smaltimento errato potrebbero venire applicate delle penali, in base alle leggi nazionali.*

CONDIZIONI DI GARANZIA

Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto. Questo prodotto risponde a standard qualitativi elevati sia nel materiale che nella fabbricazione. La garanzia è valida per il tempo di 12 mesi dalla data di fornitura. Durante il periodo di validità della garanzia si provvederà alla riparazione e/o sostituzione gratuita di tutte le parti difettose per cause di fabbricazione ben accertate, con esclusione delle spese di mano d'opera o eventuali trasferte, trasporti e imballaggi. Sono esclusi dalla garanzia tutti i componenti soggetti ad usura.

La sostituzione o riparazione effettuata durante il periodo di garanzia non hanno l'effetto di prolungare la durata della garanzia. La garanzia non è valida in caso di: riparazione effettuata da personale non autorizzato o con pezzi di ricambio non originali, avarie o vizi causati da negligenza, urti o uso improprio. Non si risponde di malfunzionamenti su apparecchiature elettroniche o software derivati da agenti esterni quali: sbalzi di tensione, campi elettromagnetici, interferenze radio, ecc.

La garanzia decade se non viene rispettato quanto sopra e se il numero di matricola (se presente) risulti asportato, cancellato o alterato. I prodotti ritenuti difettosi devono essere resi solo e soltanto al rivenditore presso il quale è avvenuto l'acquisto. Spedizioni inviate direttamente verranno respinte.