

Destinazione d'uso

Il prodotto è un coadiuvante nella rigenerazione e riparazione tessutale cutanea in lesioni acute e croniche (lesioni o alterazioni cutanee superficiali o profonde di varia natura come herpes labialis, afte, ascessi, otite esterna, acne infetta, eczemi, orticaria, micosi, punture d'insetti, abrasioni, escoriazioni, pruriti intimi, emorroidi, fistole, ragadi, geloni, occhio di pernice, onicomicosi, tiloma, verruche, unghia incarnita, piede d'atleta, ustioni, ferite chirurgiche, lesioni vascolari anche diabetiche, lesioni con esposizione di derma e/o di tessuto osseo, radiodermiti, ulcere da pressione). Coadiuvante il trattamento post tatuaggio. Riduce il rischio di formazione del cheloide. Indicato per la gestione dei trapianti cutanei. Grazie alla sua azione protettiva tessutale e alle sue proprietà di controllo della carica batterica, favorisce la guarigione di lesioni cutanee infette di varia natura. Riduce la necessità di debridement chirurgico. Il dispositivo mantiene una corretta idratazione tessutale nella sede della lesione, evitando la formazione di escara e la macerazione perilesionale.

Il prodotto contrasta la colonizzazione batterica dell'area trattata. Dispositivo medico. Solo per uso cutaneo.

Tipologia dell'operatore

Per lesioni semplici: seguire le indicazioni riportate nel presente foglietto illustrativo.

Per lesioni complesse (che richiedono supervisione medica): il dispositivo può essere usato sia in strutture sanitarie sia a domicilio sotto controllo medico, a cura del personale sanitario o anche da parte di familiari o addetti all'assistenza, adeguatamente addestrati all'uso del prodotto.

Modalità di applicazione

TUBO GEL 30ml

Trattamento di lesioni semplici: herpes labialis, acne infetta, eczemi, orticaria, micosi, escoriazioni, pruriti intimi, emorroidi, fistole, ragadi, occhio di pernice, onicomicosi, tiloma, verruche, unghie incarnite, piede d'atleta, ustioni, ferite traumatiche.

Pulire, se necessario, la ferita con acqua o fisiologica, applicare una piccolissima quantità di Holoil® e massaggiare fino a completo assorbimento. Coprire, se necessario, la ferita con cerotto traspirante o con garza sterile in TNT, in modo che fattori esterni non diano luogo ad infezioni. Ripetere la medicazione quotidianamente fino a completo risanamento. In caso di micosi e onicomicosi: applicare Holoil® per almeno 15 giorni dopo la completa rigenerazione.

GEL SPRAY 100ml - GARZE medicate monouso 10 pz. (imbustate singolarmente) 10cm x 10cm

Trattamento di lesioni complesse: ferite traumatiche e post-chirurgiche, ustioni, ulcere, ulcere da pressione, radiodermiti, lesioni vascolari anche diabetiche, lesioni con esposizione di derma e/o di tessuto osseo, gestione dei trapianti cutanei.

ATTENZIONE: le lesioni complesse richiedono sempre la supervisione di un medico o di personale medico autorizzato. Per maggiori informazioni sull'uso di Holoil® in questi casi consultare il sito www.holoil.it

IMPORTANTE: le garze medicate devono essere cambiate ad ogni medicazione.

Limiti di impiego

Il dispositivo è inefficace su tessuto necrotico se l'ipossia tessutale è minore di 30 mmHg di O₂.

Controindicazioni

Nella zona trattata non usare pomate o disinfettanti di nessun tipo contemporaneamente all'utilizzo del prodotto.

L'utilizzo improprio delle formulazioni può determinare una ritardata o nulla rigenerazione e riparazione tessutale, impedendo il fisiologico processo di guarigione.

Nel caso si verifichi un'ipersensibilità ai principi attivi o a uno qualsiasi degli eccipienti è necessario interrompere il trattamento e istituire una terapia idonea.

L'applicazione del dispositivo, in qualsiasi sua formulazione, potrebbe fare insorgere una temporanea sensazione di bruciore, prurito o rossore intorno alla zona lesionata, a vantaggio di una progressiva rivascularizzazione della lesione.



Attenzione: consultare le istruzioni per l'uso

www.rimos.com - info@rimos.com

CE 0476



Non disperdere nell'ambiente

Avvertenze

- Consente in molti casi di non fare terapia antibiotica locale e/o di accorciare la terapia antibiotica sistemica.
- Evitare l'utilizzo di disinfettanti perché intervengono negativamente sul processo di rigenerazione e riparazione tessutale.
- Il prodotto teme l'aria e la luce. Esporlo all'aria solo il tempo necessario richiudendo bene il contenitore dopo il suo utilizzo.
- Conservare a temperatura ambiente (20°/ 25°C).
- Il prodotto, composto da sostanze naturali di origine vegetale, non è pericoloso per la salute e l'ambiente. Potrebbero insorgere allergie anche se fino ad ora mai rilevate.
- Non ingerire.
- Dopo l'uso, smaltire secondo le regole le garze Holoil® ed i contenitori.
- Non utilizzare la stessa garza Holoil® su altri pazienti.
- Il dispositivo non è stato sperimentato clinicamente sulle ustioni di 2° e 3° grado.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
- Data la presenza di Olio di Neem, si sconsiglia l'uso del prodotto in caso di desiderio di concepimento.
- Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata.

Principi attivi

Azadiractina - Iperforina

NON CONTIENE PARABENI E PETROLATI

INCI formulazione gel SPRAY



Componenti: Melia Azadirachta Seed Oil; Hypericum Perforatum Flower Extract.

Eccipienti: Aqua [Water]; Propylene Glycol; Ciclodextrin; Phenoxyethanol; Carbomer; Triethanolamine; Benzoic Acid; Dehydroacetic Acid; Sodium Dehydroacetate; Ethylhexylglycerin; Aroma.

INCI formulazione gel Tubo 30 ml



Componenti: Melia Azadirachta Seed Oil; Hypericum Perforatum Flower Extract.

Eccipienti: Aqua [Water]; Propylene Glycol; Ciclodextrin; Carbomer; Triethanolamine; Phenoxyethanol; Benzoic Acid; Dehydroacetic Acid; Sodium Dehydroacetate; Ethylhexylglycerin; Aroma.

INCI formulazione gel GARZE MEDICATE



Componenti: Melia Azadirachta Seed Oil; Hypericum Perforatum Flower Extract.

Eccipienti: Aqua [Water]; Propylene Glycol; Triethanolamine; Carbomer; Phenoxyethanol; Benzoic Acid; Dehydroacetic Acid; Ethylhexylglycerin; Aroma.

Rev. 12 di Giugno 2018

La data di scadenza riportata sulla confezione si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

 LOT NUMERO DI LOTTO	 REF CODICE PRODOTTO	 LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE	 MATERIALE RICICLATO E/O RICICLABILE	 DOPO L'USO NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE
 DATA ENTRO CUI IL DISPOSITIVO PUÒ ESSERE USATO	 LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO	 QUANTITÀ STIMATA	 FABBRICANTE	 DOPO L'APERTURA NON UTILIZZARE DOPO I MESI INDICATI

COD.INT. ISTHOLG



Attenzione: consultare le istruzioni per l'uso

www.rimos.com - info@rimos.com

CE 0476



Non disperdere nell'ambiente