


## Scheda tecnica

Rev. 02 del 03/03/09 \_ Mod. 71 D

# 25778

### Dati generici

<b>Descrizione:</b>	Contenitore monouso per lo smaltimento di tutti i rifiuti ospedalieri speciali
<b>Chiusura:</b>	Con coperchio monoblocco con collante
<b>Materiale:</b>	Plastico (100 % Polipropilene)
<b>Colore:</b>	Giallo (materiale colorato con masterbatch senza metalli pesanti) (materiale conforme REACH)
<b>Forma:</b>	Troncopiramidale
<b>Collante coperchio:</b>	Senza lattice o elementi a base di lattice
<b>Dimensioni esterne:</b>	400 x 300 x 640 H. mm (coperchio chiuso)
<b>Peso:</b>	1,78 Kg
<b>Portata max.:</b>	24 Kg
<b>Volume:</b>	60 L.

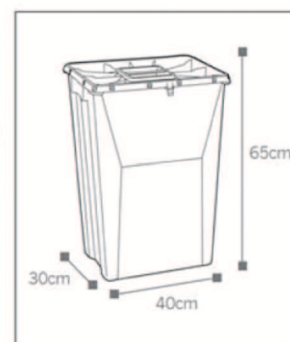

### Vantaggi:

- Coperchio monoblocco con impugnatura per il trasporto
- Presenza di due maniglie sul corpo
- Maniglie laterali e centrali testate per il doppio della portata massima
- Contenitori stabili, impilabili con logistica ottimizzata che permette di ridurre gli spazi di stoccaggio e i costi di trasporto
- Sovrapponibili fino a 3 metri.
- Contenitore resistente agli urti sia a basse che ad alte temperature
- Alta resistenza alla perforazione .
- Facilità d'impiego.
- Chiusura definitiva irreversibile
- Smaltimento a mezzo incenerimento senza emissioni di gas nocivi



## Istruzioni

### Chiusura provvisoria:

Appoggiare il coperchio sul corpo senza premere

### Chiusura definitiva:

Per la chiusura in modo definitivo del coperchio, appoggiare il coperchio sul corpo e premere i quattro angoli due a due, e poi bloccarlo con una pressione lungo i 4 lati sino a quando si avverte uno scatto sonoro (click). La chiusura definitiva e l'impermeabilità sono garantite mediante la guarnizione all'interno del perimetro del coperchio e di 14 ganci



## Smaltimento:

Alla fine del ciclo vitale, i contenitori vengono smaltiti per incenerimento, senza emanazioni nocive e senza deposito di materiali pesanti

## Accessori:

Possibilità di utilizzare il contenitore con il carrello SC



## Trasporto contenitore in chiusura definitiva:

Preso dalla maniglia centrale



Preso dalla(e) maniglia(e) laterale(i)



## Informazioni di sicurezza:

Utilizzare il contenitore solo con il coperchio previsto

Assicurarsi che il coperchio sia ben chiuso

Rispettare il limite di riempimento

Non cercare di riaprire il contenitore chiuso e sigillato definitivamente

Non cercare di recuperare oggetti all'interno del contenitore

## Collaudo:

Conforme all'accordo ADR

Certificato UN N. J 080188-1

Resistenza alla perforazione secondo lo standard BS 7320 (British Standard) e NFX 30-505 (AFNOR)

Resistenza media di 15 N.