

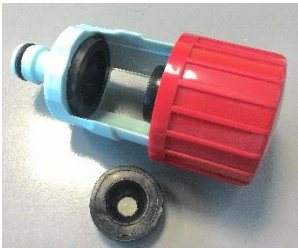


Cod.. 27838 / Ref. 01938
SHOWER EXTENSION HOSE
PROLUNGA DOCCIA

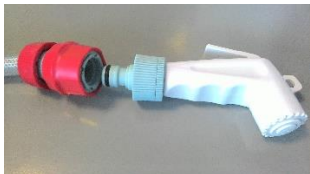

Destinazione d'uso e descrizione dell'apparecchiatura	Tubo flessibile da 6 m completo di doccetta a pulsante e adattatore per rubinetto. Utilizzato per pulizia ed igiene di pazienti allettati.
Composizione	Plastiche
Immagazzinaggio	In caso di immagazzinamento si devono rispettare le seguenti condizioni ambientali: 1. umidità relativa 10% / 90 %; 2. temperatura -10°C / +50°C.
Limitazioni d'uso e avvertenze particolari	I sussidi non devono essere utilizzati: • Senza aver effettuato tutte le previste regolazioni e messe a punto dedicate. • Quando l'uso è controindicato o genera gravi disagi al paziente. • Con manomissioni e/o modifiche sul prodotto originale. • In configurazione impropria o quando ci sia il sospetto che possa arrecare danno al paziente.
Effetti collaterali	Non si riscontrano effetti collaterali. Utilizzare sempre l'apparecchiatura in maniera consona. È raccomandata la conoscenza del presente libretto di istruzioni.
Disimballaggio	Estrarre i sussidi dall'imballo senza utilizzare taglierino per evitare di danneggiarli e smaltire correttamente gli imballi. Eventuali danni dovuti al trasporto devono essere prontamente segnalati al trasportatore e al fornitore: i sussidi danneggiati non devono essere utilizzati.
Installazione ed utilizzo	Inserire nell'adattatore del rubinetto la guarnizione della corretta dimensione (Fig. 1). Inserire l'adattatore a cavallo del rubinetto e stringerlo avvitando il cilindro rosso superiore (Fig. 2). Spingere l'attacco rapido per collegare il tubo all'adattatore (Fig. 3) e fare la stessa operazione per inserire la doccetta (Fig. 4 e 5). Per sganciare l'attacco rapido, tirare la porzione terminale verso il centro del tubo reggendo l'elemento connesso con l'altra mano (Fig. 6).  Fig. 7  Fig. 8  Fig. 9  Fig. 10  Fig. 11  Fig. 12

Cod.. 27838 / Ref. 01938
SHOWER EXTENSION HOSE
PROLUNGA DOCCIA

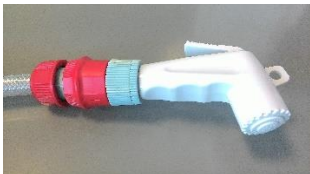

Manutenzione	Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti da tecnici specializzati o persone con conoscenza del contenuto del presente libretto istruzioni. Verificare le condizioni di sicurezza dell'apparecchio dopo ogni situazione di "trattamento rude" (es.: caduta, urti violenti, versamento di liquidi, etc.) ed ogni qualvolta si abbiano dei dubbi sullo stato di sicurezza dell'apparecchio. Gli interventi di manutenzione ordinaria vanno eseguiti almeno una volta ogni sei mesi. Mantenere il dispositivo costantemente pulito e controllare lo stato dei componenti e delle guarnizioni.
Lavaggio	Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando con acqua. Asciugare evitando l'esposizione diretta alla luce del sole. Per le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, inchiostro, caffè, liquori, chewing-gum ecc.) si consiglia di seguire le seguenti istruzioni: disciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido incolore) in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente.
Disinfezione	Per la disinfezione delle superfici si consiglia l'utilizzo di prodotti disinfettanti quali AMUCHINA® 10% o equivalente con sodio ipoclorito allo 0,1.e neutro. Risciacquare bene.
Ulteriori informazioni	