


COD. 27733 SEDIA GIREVOLE CON MANIGLIA PER DOCCIA

⚠ ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo foglietto illustrativo prima di utilizzare il prodotto.

- ▲ Controllare che la sedia doccia con maniglia sia assemblata in modo appropriato prima dell'uso.
- ▲ Rispettare le indicazioni sulla portata massima indicate dall'etichetta.

ASSEMBLAGGIO / FISSAGGIO:

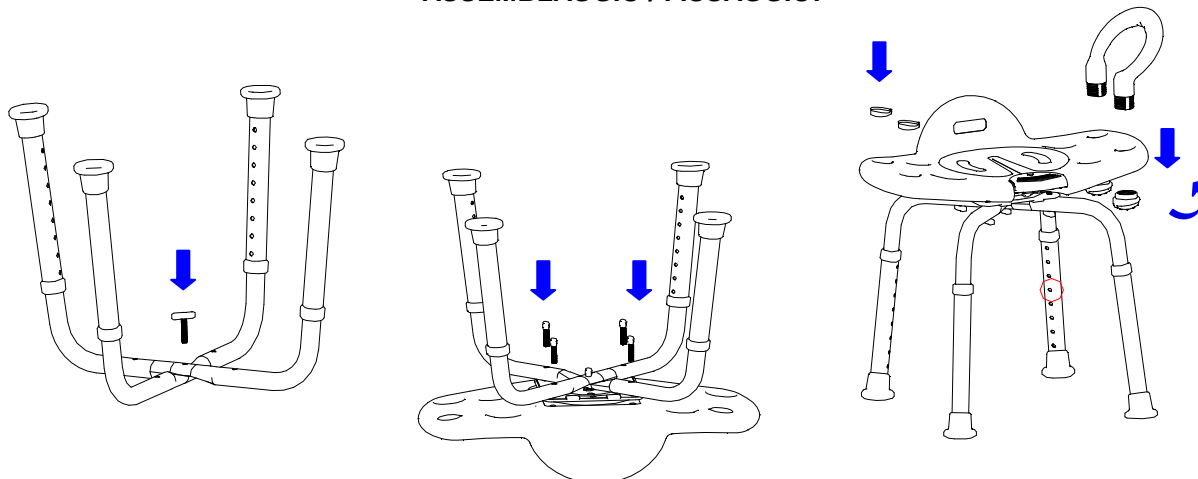


1. Incrociare le due gambe per formare la giusta angolazione e avvitare il tassello nel foro centrale.


2. Avvitare le altre viti alla sedia doccia.

3. Regolare l'altezza del sedile.
4. Scegliere una estremità per assemblare la maniglia e posizionare i tappi sull'altro lato.

MODO D'USO:

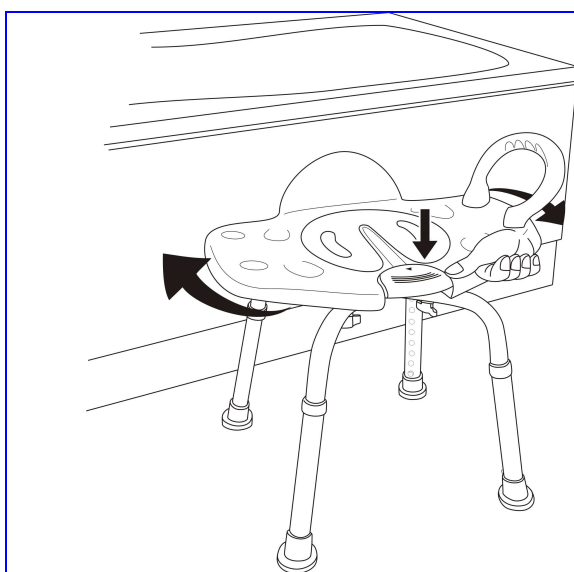

1. Regolare l'altezza del sedile, sedersi. Spingere l'apposita linguetta verso il basso per ruotare il sedile.
2. Girare verso destra o sinistra impugnando con una mano la maniglia.

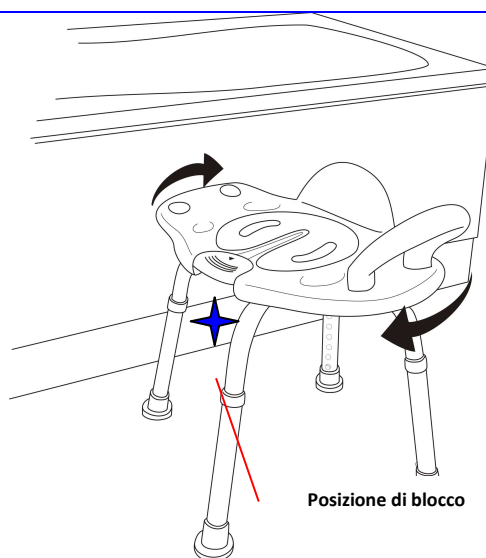

3. Spingere la linguetta e girare.
4. Attivare la posizione di blocco con il sedile parallelo all'asse principale.