

# Cod. 27259

## Bilancia veterinaria - grande

**Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto.  
Questa bilancia è prodotta con materiali di alta qualità e garantisce, se mantenuta in perfetta efficienza, una totale affidabilità e precisione, anche a distanza di anni.**

**Attenzione, gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.**

### Caratteristiche tecniche:

- Display LCD 1"
- Capacità: 100kg /220Lbs
- Sensibilità: 100g / 0,2Lb
- Spegnimento automatico
- Indicatore di sovraccarico automatico ("Err")
- Indicatore batteria quasi scarica ("Lo")
- Unità di misura Kg/lb/st selezionabile dall'utente

### Manuale utente

1. Si prega di rimuovere la pellicola protettiva dalle batterie prima dell'utilizzo.
2. Posizionare la bilancia sul pavimento in posizione stabile e piana, se posizionata su una superficie morbida (es.: un tappeto) la bilancia potrebbe rilevare valori imprecisi.
3. Per accendere la bilancia, appoggiare un piede sulla pedana
4. La prima volta il display visualizza la scritta "8" ed in seguito "0,0" sarà visualizzato sul display.
5. Si prega di attendere la visualizzazione della scritta "0,0". A questo punto la bilancia è pronta per la misurazione.
6. Posizionare l'animale sulla bilancia.
7. Il peso dell'animale lampeggerà sul display due volte. Il risultato della misurazione sarà leggibile per dieci secondi circa.
8. Dopo la pesatura la bilancia si spegnerà automaticamente dopo circa sei secondi.

### Alimentazione:

La bilancia funziona con una batteria al litio sostituibile. (Tipo CR 2032 ) inclusa

### Sostituzione delle batterie:

Quando la scritta "LO" compare sul display, si prega di sostituire le batterie.

### Messaggi d'errore visualizzati dal display:

Se il carico supera i 100 kg, la bilancia visualizza sul display "ERR".  
Per evitare guasti si prega di non sovraccaricare la bilancia! Se la bilancia è sottoposta ad un carico eccessivo potrebbe danneggiarsi. In questo caso la garanzia decade.

### Condizioni ambientali:

La temperatura ambientale può influenzare significativamente la precisione di misurazione.  
Misurazioni corrette ed accurate possono essere ottenute ad una temperatura ambiente (20-25 gradi Celsius).

**Note:**

Si prega di non utilizzare la bilancia nelle immediate vicinanze di apparecchi che generano potenti emissioni elettromagnetiche (cellulari, forni a microonde). Per pulire la bilancia si raccomanda l'utilizzo di un panno inumidito senza utilizzare alcun solvente.



Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per ulteriori informazioni sui luoghi di raccolta, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto. In caso di smaltimento errato potrebbero venire applicate delle penali, in base alle leggi nazionali.

**CONDIZIONI DI GARANZIA**

Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto.

Questo prodotto risponde a standard qualitativi elevati sia nel materiale che nella fabbricazione.

La garanzia è valida per il tempo di 12 mesi dalla data di fornitura.

Durante il periodo di validità della garanzia si provvederà alla riparazione e/o sostituzione gratuita di tutte le parti difettose per cause di fabbricazione ben accertate, con esclusione delle spese di mano d'opera o eventuali trasferte, trasporti e imballaggi. Sono esclusi dalla garanzia tutti i componenti soggetti ad usura.

La sostituzione o riparazione effettuata durante il periodo di garanzia non hanno l'effetto di prolungare la durata della garanzia.

La garanzia non è valida in caso di: riparazione effettuata da personale non autorizzato o con pezzi di ricambio non originali, avarie o vizi causati da negligenza, urti o uso improprio.

non risponde di malfunzionamenti su apparecchiature elettroniche o software derivati da agenti esterni quali: sbalzi di tensione, campi elettromagnetici, interferenze radio, ecc.

La garanzia decade se non viene rispettato quanto sopra e se il numero di matricola (se presente) risulti asportato, cancellato o alterato.

I prodotti ritenuti difettosi devono essere resi solo e soltanto al rivenditore presso il quale è avvenuto l'acquisto. Spedizioni inviate direttamente a verranno respinte.