

DATA DI STAMPA: Giovedì, 15 Febbraio 2018



► VAI ALLA SCHEDA ON-LINE [www.chinesport.it/go/05003/](http://www.chinesport.it/go/05003/)

## 05003 ARCOMETRO

L'arcometro è uno strumento validato, non invasivo, per la misurazione della Cifosi e della Lordosi.

L'arcometro consiste in uno strumento manuale composto da una barra millimetrata sulla quale sono posizionate tre aste: una è fissa ad un'estremità, quella centrale è mobile su due assi e la terza è mobile su un asse. Le estremità delle tre aste individuano tre punti, per i quali passa una ed una sola circonferenza della quale con l'arcometro si misurano due valori: una corda e la relativa freccia.

In base a questi dati si può calcolare l'angolo di Cobb ed il raggio di curvatura mediante l'utilizzo di apposite tabelle a doppia entrata. Insieme allo strumento viene fornita una tavola per il calcolo dell'angolo di Cobb (uso corrente ad integrazione dell'esame clinico).

La schermata rappresenta l'arcometro con il principio di funzionamento: si noti che per semplicità di calcolo la barra intermedia va collocata nel punto mediano tra le due barre laterali.

A corredo viene fornito il manuale d'uso "Arcometro D'Oswaldo" (cod. 01769).



05003 - ARCOMETRO

## Accessori



### 01769 MANUALE ARCOMETRO D'OSUALDO

Manuale per l'uso dell' Arcometro D'Oswaldo, strumento per la misurazione della cifosi e della lordosi.

**Altre immagini dell'articolo**

