

MANUALE DI ISTRUZIONI

SCALDA PARAFFINA / FORNETTO SCALDACERA CON TERMOSTATO
230V 300W - capacità 2,5Lt - per trattamenti mani / piedi - con kit accessori

cod. 137732 - Modello: PARAFFIN WAX HEATER



Gentile cliente

Nel ringraziarla per aver scelto il nostro modello SCALDAPARAFFINA ci auguriamo che possa trarre dal suo recente acquisto ogni soddisfazione.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente queste istruzioni. Il produttore e/o l'importatore non può essere considerato responsabile per eventuali danni a persone o cose causati dalla non applicazione delle avvertenze ed istruzioni contenute in questo libretto.

Le norme di questo libretto spiegano la messa in funzione, l'utilizzo e la manutenzione corretta per il prodotto. Seguire tutte queste indicazioni per assicurarsi la sua durata, la sua affidabilità elettrica e meccanica. Conservare questo libretto di istruzioni.

Non utilizzare questo prodotto per una funzione differente da quella esposta nel presente libretto.

Dopo aver tolto il prodotto dal suo imballo, assicurarsi della sua integrità: nel dubbio rivolgersi subito a persona professionalmente qualificata. Non lasciate le parti dell'imballo alla portata di bambini o invalidi.

Se il prodotto cade o riceve forti colpi farlo verificare subito dal produttore o da un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato.

L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali, tra le quali:

- ° non deve essere toccato con mani bagnate o umide
- ° Non deve essere toccato a piedi nudi
- ° non deve essere utilizzato da bambini o incapaci

Collegare il prodotto alla rete di alimentazione/presa elettrica solo se:

° i dati elettrici della rete corrispondono a quelli riportati sulla targa dell'apparecchio

° la portata dell'impianto/presa è adeguata alla sua potenza massima.

In caso contrario rivolgersi subito a persona professionalmente qualificata.

In caso di incompatibilità tra la Vostra presa e la spina dell'apparecchio, far sostituire la presa con altra di tipo adatto da persona professionalmente qualificata.

Non usate un cavo di alimentazione danneggiato o logoro, se il cavo di alimentazione si dovesse danneggiare esso deve essere sostituito dal costruttore o da un Centro di Assistenza Tecnica o comunque da una persona con qualifica simile in modo da prevenire ogni rischio.

In generale è sconsigliabile l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe; qualora il loro uso si rendesse indispensabile, è necessario utilizzare solamente adattatori semplici o multipli e prolunghe conformi alle vigenti norme di sicurezza, facendo però attenzione a non superare il limite di portata in valore di corrente, marcato sull'adattatore semplice e sulle prolunghe e quello di massima potenza marcato sull'adattatore multiplo.

Non lasciate incustodito l'apparecchio mentre è collegato alla rete elettrica. Spegnerne il suo interruttore quando non è utilizzato.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, spegnere l'interruttore dell'apparecchio e staccare la sua spina dalla rete di alimentazione.

In caso di cattivo funzionamento e/o guasto, spegnere l'interruttore dell'apparecchio; rivolgersi subito al produttore o ad un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato e richiedere, per l'eventuale riparazione, l'uso di ricambi originali.

Quando si decide di eliminare l'apparecchio, spegnere l'interruttore e scollegarlo dalla rete elettrica; riporre infine il prodotto in luogo inaccessibile a bambini e incapaci.

L'impianto elettrico a cui è collegato il prodotto deve essere conforme alle norme CEI 64-8 "Norme per gli impianti elettrici negli edifici civili"

Avvertenze particolari

L'apparecchio è conforme alla direttiva CEE 73/23 e CEE 93/68 e alla direttiva CEE 89/336 per la soppressione dei radiodisturbi.

Usare l'apparecchio a temperatura ambiente non superiore a 40°C (104°F).

Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici.

L'apparecchio può essere utilizzato unicamente per il riscaldamento di paraffina bassofondente.

Non immergere l'apparecchio o le sue parti in acqua od altri liquidi.

Non utilizzare l'apparecchio in presenza di sostanze o vapori infiammabili, come alcool, insetticidi, benzina, ecc.

Non accendere il fornello senza aver prima introdotto all'interno della vasca la paraffina.

Rispettare il quantitativo minimo e massimo (livelli incisi nel cestello) di paraffina prevista.

Funzionamento

Collegare l'apparecchio con il cavo di alimentazione in dotazione ad una presa di corrente.

Immettere nella vasca una quantità compresa tra 1,8 e 2,5Lt di paraffina solida direttamente a contatto con il fondo della medesima e coprire il fornello con il coperchio.

Accendere spostando a destra il selettore Termostato / interruttore dalla posizione OFF alla posizione temperatura desiderata LOW(LO) oppure HIGH (HI), la spia luminosa si accenderà indicando che il dispositivo stà riscaldando.

HIGH - Temperatura 65°C. Da utilizzarsi solamente nella fase iniziale per sciogliere velocemente la paraffina. Si prega di fare attenzione e si sconsiglia, di introdurre mani e piedi nella vasca quando il Selettore Temperatura e si trova su questa impostazione, basterebbero pochi secondi di contatto per provocare ustioni.

LOW - Temperatura di 55°C. E' l'impostazione temperatura, ove è possibile eseguire il Trattamento. E' importante però ricordarsi prima di inserire Mani o Piedi.

Per mantenere la paraffina a temperatura costante, coprire sempre la vasca con l'apposito coperchio.

Metodo di Utilizzo

Preparare la cute della cliente detergendo la zona da trattare. Successivamente esfoliare la parte da trattare con peeling o scrub, risciacquare ed asciugare. Applicare dei prodotti emollienti, nutrienti, idratanti, cicatrizzanti sottoforma di sieri, creme, gel o burri. Una volta effettuati questi procedimenti si potrà procedere con l'applicazione della paraffina che avviene immergendo la mano nella vaschetta con la paraffina precedentemente sciolta. La zona da trattare va immersa almeno 3 volte (temperatura 55°C "LO") con delle piccole pause di raffreddamento fino a creare uno bello strato di occlusione sulla pelle. Mediante dei guanti e calzari in lamina di polietilene monouso (opzionali, non forniti in dotazione) si andrà a sigillare lo strato di paraffina e occludere ulteriormente. Infine il guanto in spugna ed il calzare in spugna vanno indossati sopra gli appositi monouso per mantenere la parte trattata al caldo e dunque favorire la dilatazione dei pori e la penetrazione dei prodotti. Dopo circa 15/20 minuti si può procedere con la rimozione dei guanti / calzari e della paraffina e senza risciacquare si può procedere con il massaggio sulla parte trattata per far penetrare il prodotto precedentemente applicato.

DATI TECNICI

Fornetto scalda paraffina: alimentazione 230V 50Hz (Shuko plug)

Potenza assorbimento: 300W

Temperatura di Fusione: 70 °C

Termostato automatico con 2 livelli di temperatura selezionabili: LOW 55°C - HIGH 65°C

Materiale: Plastica PP antiurto

Dimensioni del dispositivo: larghezza 31 x lunghezza 24 x altezza 16 cm

Capacità camera 1,8l (minima) - 2,5l (massima)

Peso imballo: 3kg

Pulizia

- Disinserire sempre la spina dalla presa di corrente durante la pulizia dell'apparecchio.
- Utilizzare un panno morbido, imbevuto di olio detergente, per pulire il corpo dell'apparecchio da eventuali residui di paraffina.
- Non riaccendere sino a completa evaporazione dei liquidi utilizzati per la pulizia.
- Non immergere in acqua.

Come rimuovere la vecchia paraffina

Quando la paraffina è solida, accendere l'apparecchio per qualche minuto fino a che i bordi della paraffina sono sciolti e staccati dal fornello.

Staccare quindi la spina e spingere da una estremità il blocco di paraffina che si inclinerà.

Togliere poi la paraffina dal fornello.

Non usare oggetti taglienti per togliere la paraffina solidificata poiché la cavità può danneggiarsi.

Copyright

Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione di qualsiasi parte di questo manuale, in qualsiasi forma, senza l'esplicito consenso scritto.

Dichiarazione di Conformità

Produttore: Shenzhen Conyl Tecnyl Technology Co.Ltd - address: Room 305, building C, No 30 Changzen Community, Yutang Street, Guanming District, Shenzhen, China

Dichiara che il prodotto:

137732 - Modello: PARAFFIN WAX HEATER

è conforme alle seguenti direttive e norme:

- Dispositivo conforme alle normative CE (e conforme all'uso professionale nei centri di estetica secondo quanto previsto dal Decreto Legge n.206 del 15/10/2015 scheda 10 e D.L. n. 1 del 04.01.1990)
- Direttiva CEI EN 60335-1 / 60335-2 norme di sicurezza degli apparecchi elettrici.
- Direttiva CEE 73/23 del 19 Febbraio 1973
- Direttiva CEE 93/68 del 22 Luglio 1993
- Direttiva CEE 89/336 per la soppressione dei radiodisturbi

Rev. A/03/2018