



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BARELLA CARROZZINA VALUE - 4 RUOTE VALUE WHEELCHAIR STRETCHER - 4 WHEELS

ITALIANO

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

I. Parametri tecnici:

1. Dimensioni da piegata: 92 x 52 x 16 cm
2. Piegata in sedia a rotelle: altezza dello schienale: 91cm - larghezza: 50 cm seduta: altezza: 49 cm - larghezza: 50 cm
3. Peso netto: 8 kg
4. Capacità di carico: 159 kg

II. Metodo operativo:

1. Questo modello è dotato di una lega di alluminio di alta qualità e di pelle Oxford. Per rendere più sicuro il trasporto del paziente, in dotazione ci sono delle cinture.
2. Aprire la barella per sedia a rotelle e tirare la parte 4 e spingerla verso il basso, dopo averla regolata, premere verso il basso la parte 2, fino al punto stabilito, la sedia a rotelle si bloccherà automaticamente.
3. Premere il pulsante sulla parte 2, la maniglia può essere tirata fuori e spinta indietro a piacimento. Premere la parte 3, è possibile chiudere la maniglia nella parte posteriore.
4. Per piegare la barella per sedia a rotelle, sollevare la parte 1, salire su una delle guide poste davanti alle rotelle, nel frattempo sollevare la parte 4 e quindi piegare la barella.

III. Modalità di montaggio:

Questo modello si usa principalmente in aree caratterizzate da un traffico o accesso difficile, come corridoi stretti, cancelli, cortili o alcune zone di passaggio.

IV. Manutenzione:

1. Mantenere la pulizia, antisepsi inclusa.
2. Verificare la presenza di eventuali parti della barella allentate.

V. Attenzione:

Durante il trasporto del paziente, assicurarsi che ogni parte funzioni bene e allacciarsi la cintura.

VI. Conservazione e trasporto:

1. Questo prodotto deve essere conservato in un ambiente asciutto e non soggetto ad erosione.
2. Questo prodotto può essere trasportato da un veicolo di trasporto ordinario.

VII. Imballaggio e accessori:

1. Questo prodotto è imballato completamente in una confezione singola.



| | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|--|---|
| | Fabbricante | | Conservare in luogo fresco ed asciutto | | Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 |
| | Codice prodotto | | Conservare al riparo dalla luce solare | | Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso |
| | Numero di lotto | | Dispositivo medico | | Rappresentante autorizzato nella Comunità europea |
| | Leggere le istruzioni per l'uso | | Data di fabbricazione | | |

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

REF MLF999-A3-1 (Gima 34073)

Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd
No.999 Hongqi Road, Changyinsha
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made in China



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076DE, Amsterdam, Netherlands

Importato da / Imported by:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

