

# BACINELLE IN PLASTICA AUTOCLAVABILI

## Manuale d'uso

Prima di procedere all'utilizzo del prodotto, procedere alla sterilizzazione.

**ITALIANO**

Il prodotto è autoclavabile fino ad una temperatura max di 137°C; ma prima di procedere con questa operazione si consiglia di lavarlo in lavastoviglie secondo le norme ISO 15883. Posizionare il prodotto pulito e libero in modo che sia nel lavaggio che durante la sterilizzazione non vi siano ostruzioni per la corretta circolazione di acqua e vapore. Evitare la sterilizzazione a secco e l'utilizzo di solventi o sostanze abrasive per la pulizia, utilizzare solo prodotti compatibili con polipropilene. Non conservare sotto i 4°C. Vita prodotto circa 36 mesi.



Al termine del ciclo di vita del prodotto attenersi alle normative vigenti in materia di smaltimento. Non disperdere nell'ambiente!

**REF**

26630 - 26631 - 26632 - 26633 - 26635  
26636 - 26638 - 26639 - 26640

