



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CARRELLO REX REX TROLLEY

MANUALE D'USO – USER MANUAL

- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

M27439-M-Rev.2-10.21

REF

27439



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy

MD




INTRODUZIONE





Ai fini del regolamento (UE) 2017/745, il prodotto rientra nei DISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE I. Si consiglia di leggere attentamente il seguente manuale prima di utilizzare il presidio.

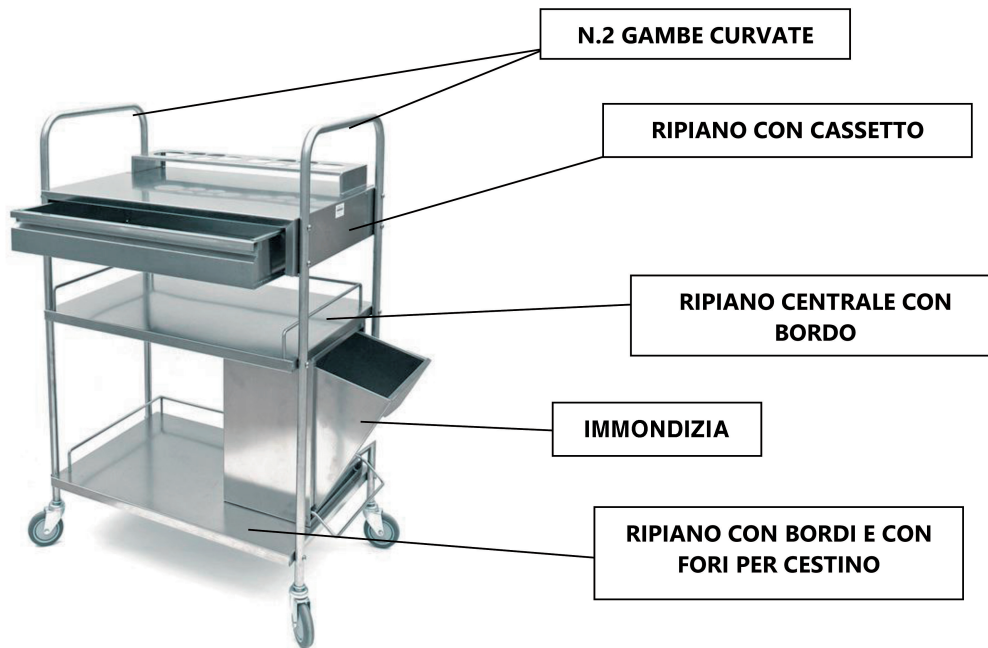DESCRIZIONE

Il presente articolo è un carrello di medicazione ad uso ospedaliero, interamente in acciaio inox a 3 ripiani dotato di cestino per i rifiuti e portabottiglie. Indicato per effettuare le medicazioni in ospedali, cliniche e ambulatori medici.









COMPONENTI:

<p>N.2 gambe curvate</p>	
<p>N.2 ruote Ø 100 mm senza freno</p>	
<p>N.2 ruote Ø 100 mm con freno</p>	
<p>N.1 ripiano superiore con cassetto e portabottiglie</p>	

N.1 ripiano centrale con bordi	
N.1 ripiano con bordi e con fori per aggancio immondizia	
N.1 Cestino per la immondizia	

KIT DI MONTAGGIO:

8 TBE 8x35 (per ripiano superiore con cassetto)	
8 Rosette M8 (per ripiano superiore con cassetto)	
4 TSPE 6x18 (per cestino immondizia)	
4 Dadi M6 (per cestino immondizia)	
4 Rosette M6 (per cestino immondizia)	
1 chiave m6m10 1 chiave a brugola da 4 1 chiave a brugola da 5 1 chiave a brugola da 8 (per ruote)	

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Preparare un piano d'appoggio abbastanza ampio sul quale lavorare.

Prendere una gamba e il ripiano superiore con cassetto e appoggiare sul piano di lavoro.



Fissare la gamba ad un lato del ripiano superiore tramite n.4 viti **TBE 8x35** in dotazione.



Svitare le viti che mantengono il ripiano centrale al traverso.

E riavvitare per fissare il ripiano centrale alla gamba.



Procedere nello stesso modo svitando le viti che mantengono l'ultimo ripiano al traverso e riavvitare per fissarlo alla gamba.




Un lato è completo, passare ad assemblare la seconda gamba seguendo gli stessi passaggi.



Schiacciando la leva a pedale inclinare all'indietro il cestino ed estrarre quest'ultimo.



Inserire le n.4 viti TSPE 6x18 e sul fondo del ripiano tenere relativa rondella e dado per fissare il cestino val ripiano.

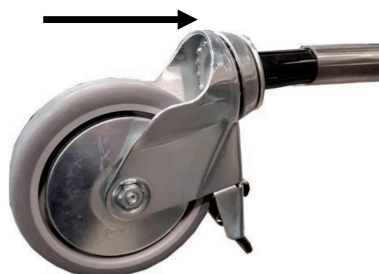

Inserire le ruote con freno frontalmente (lato cassetto) ed incastrarla una alla volta nel terminale del tubo della gamba.



Infine, prendere la brugola e avvitare fino a fissaggio ultimato.

DATI TECNICI:











Misure	Ingombro totale cm 83 x 51,5 x 119,5 h Cestino per immondizia capacità 26 L contenitore esterno: cm 33,3x25x43h contenitore interno: cm 25x30x41 pedale: cm 33x8 Scatola cm 114 x 54 x 39
Peso	33 kg (con scatola 36,7 kg)
Portata massima	15 kg/ripiano

AVVERTENZE D'USO

- Fissare bene le viti con la chiave a brugola in dotazione.
- Verificare che i dadi del bloccaggio siano ben stretti.
- Attenersi alle portate massime indicate nelle schede tecniche.
- Evitare il contatto diretto con ferite aperte.
- Non adatto all'uso in ambienti aperti.

MANUTENZIONE E PULIZIA

- Utilizzare solo ricambi originali.
- Controllare periodicamente tutti i punti di fissaggio.
- Per conservarlo al meglio, si consiglia di evitare l'esposizione prolungata ai raggi solari; il contatto con ambienti salini; il deposito in ambienti molto umidi.
- Lavare le superfici in acciaio inox con acqua saponata ed usare disinfettanti appositi.
- Risciacquare con un panno bagnato ed asciugare con cura.
- Non versare sulle superfici detergenti a base di cloro o ammoniaca, sostanze grasse ed oleose.
- Non usare per la pulizia utensili contenenti ferro. Se necessaria la disinfezione usare solo prodotti idonei non corrosivi.

	Conservare al riparo dalla luce solare		Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Codice prodotto		Leggere le istruzioni per l'uso		Fabbricante
	Data di fabbricazione		Numero di lotto		Dispositivo medico
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso				

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.