


Manuale d'Uso e Manutenzione

Barella basket universale (34098)

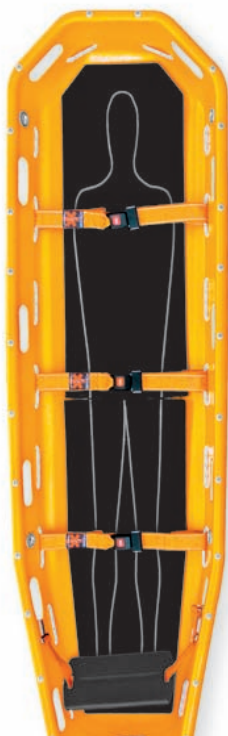

Si dichiara che il dispositivo è conforme alla Direttiva 93/42/CEE "Dispositivi Medici".

Sistema di Garanzia di Qualità per la produzione ed il controllo finale dei prodotti certificato dall'organismo notificato TÜV Product Service GMBH.

3 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

3.1 DESTINAZIONE D'USO

La barella basket è un presidio destinato al recupero e trasporto dei pazienti. È utilizzabile per operazioni di soccorso in tutti quei casi in cui sia necessario tutelare il paziente da urti laterali e non sia possibile intervenire con le normali attrezzature per il trasporto. Questo dispositivo è elitrasportabile.

Non è previsto che il paziente possa intervenire sul dispositivo.

3.2 COMPONENTI PRINCIPALI

1. Scocca in polietilene ad alta densità antiurto
2. Materasso di polipropilene espanso a cellule chiuse impermeabile
3. Poggiapiedi regolabile in polietilene reticolato monoscocca
4. Tre cinture 50 mm in nylon con aggancio rapido (quattro cinture nel modello)
5. Cima di 10 mm in poliestere per il fissaggio delle cinture di sicurezza e dei poggiapiedi

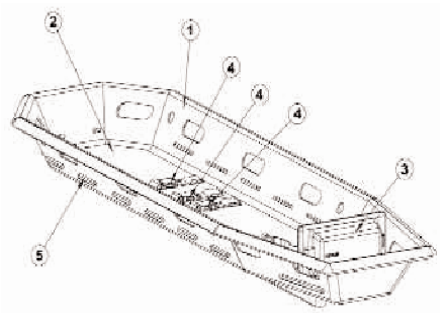


Fig. A

3.4 DATI TECNICI

Lunghezza	2150 mm
Larghezza	650 mm
Altezza	190 mm
Portata	280 kg
Peso	13,5 kg
Numero maniglie	12
Materiale scocca	polietilene ad alta densità

3.5 CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura di utilizzo: da -10 a +50 °C

Temperatura di stoccaggio: da -10 a +50 °C

Umidità relativa: da 5 a 95%